


Antigeeni kiirtesti komplekti abil saab tuvastada, kas oled nakatunud koroonaviirusesse. Test on positiivne juhul, kui sinu organismis on viirust palju, mis tähendab, et oled nakkusohtlik.



Antud testi võib teha nii nina-kui süljeproovist.

Juhendi süljeproovipõhise testi tegemise kohta leiad pakendi infolehtelt.

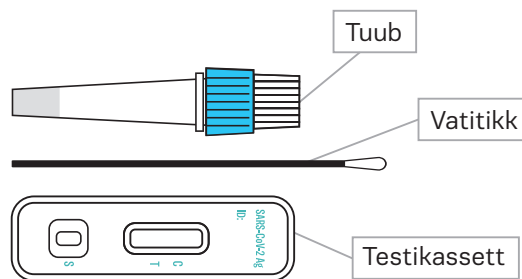


1.

- Pane valmis kell. Pese käed.
- Ava karp ja löika fooliumpakend lahti.
- Aseta lauale pakis olnud 3 eset ning kasutusjuhend. Nuuska nina.

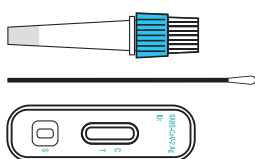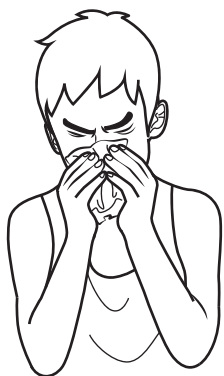


2.

- Võta pakendist välja vatitikk. Keera tuubilt maha sinine kork, aga hoi a tuubi kindlasti püstises asendis.
- Lükka vatitikk ettevaatlikult ninasõõrmesse 1 cm - 2,5 cm sügavusele ja keeruta seda ühes ninasõõrmes, tehes 5 ringi, surudes vatitikku mõõdukalt vastu nina siseseina. Seejärel korda sama teises ninasõõrmes.

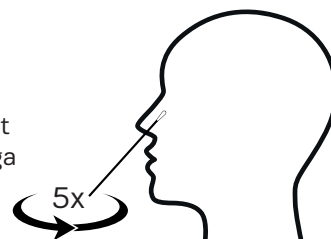


3.

- Pane vatitikk tuubi sisse. Liiguta seda selles vähemalt 30 sekundit. Hõõru vatiosa vastu tuubi seinu ja suru tuubi külgi kokku, et proovimaterjal vedelikuga seguneks.
- Nüüd suru tuubi küljed õrnalt kokku – nii pigistad vatitikust vedeliku välja.
- Võta vatitikk tuubist välja, pane tuubile sinine kork peale ja loksuta kergelt.

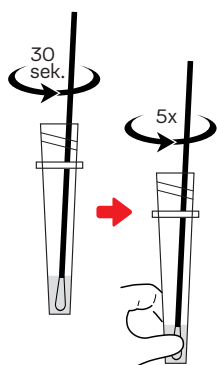

4.

- Keera tuubilt maha ülemine (läbipaistev) kork.
- Pööra tuubil põhi ülespoole nii, et saad sellest tilgutada 4 tilka testikasseti väiksemasse avasse. Viska tuub ära.

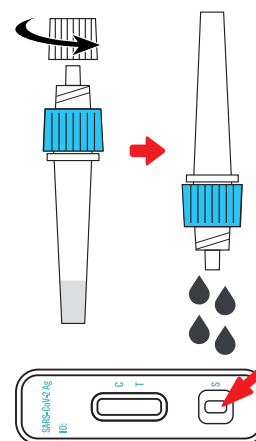


5.



- Kirjuta testikassetile testi tegemise kellaaeg ja oota täpselt 15 minutit.
- Sel ajal ilmuvad testile triibud: kas üks või kaks triipu.

6.

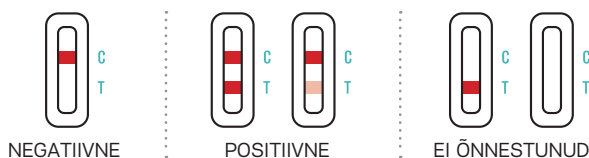

- Sinu test on **negatiivne** (test ei tuvastanud koroonaviirust), kui kontrollalale (C-tähe juurde) ilmub ainult üks värviline joon.
- Sinu test on **positiivne** (test tuvastas koroonaviiruse), kui kontrollalale (C-tähe juurde) ilmub joon ning ka testalale (T-tähe juurde) ilmub joon. Kokku kaks värvilist joont. Teine joon võib olla ka väga nõrk, kuid test tuleb ikka lugeda positiivseks.
- Test **ei õnnestunud**, kui kontrolljoont (C-tähe juurde) ei ilmunud. Palun korda testi uue komplektiga.

