

# COVID-19 antigeeni kiirtest nina-/süljetest

## KASUTUSJUHEND

*Test on mõeldud professionaalseks kasutamiseks  
meditsiinitöötaja või selleks väljaõppe saanud  
isiku poolt.*

### TESTKOMPLEKT

#### Testkomplekti kuulub:

- testkassett
- ühekordselt kasutatav vatitampoon
- proovianum (tuub)

- Alla 12-aastastel lastel võtab testproovi tervishoiutöötaja.
- 12–17-aastased lapsed võivad testproovi võtta ise täiskasvanu järelevalve all.
- 18-aastased ja vanemad isikud võivad testproovi iseseisvalt võtta.

### ENNE TESTIMIST:

- enne kasutamist hoia testkomplekti toatemperatuuril 15-30° C;
- veendu, et testkomplekti pakend on terve ja kontrolli aegumiskuupäeva;
- veenduge, et proov on võetud korralikult järgides täpselt kasutusjuhendis olevaid juhiseid;
- proovi võtmiseks vali ruum, kus ei toimu söömist, mis on ventileeritav;
- veendu, et ruumis ei viibi üleliigseid isikuid, sest proovivõtmine võib olla nakkusohtlik protsess;
- kasuta isikukaitsevahendeid, pese ning desinfitseeri käed ja pinnad;
- Võta lähedusse prügikast jäätmete jaoks. Kui testitakse mitut isikut korraga, märgistada iga testkassett vastava isiku initsiaalidega ning fikseerida proovivõtmise kellaeg.
- nuuska nina!

### PÄRAST TESTIMIST:


- käitle isikukaitsevahendeid ja jäätmeid kui olmeprügi;
- pese käed!

### KASUTUSJUHEND:

- **Süljeproov:** ärge sööge, jooge, suitsetage, närige närimiskummi ega peske hambaid 30 minutit enne süljeproovi võtmist.
- Enne süljeproovi võtmist masseerige põski õrnalt 15-30 sekundit. Asetage keel vastu alalõualuud hambajuurtele ning laske süljel sellesse piirkonda koguneda. Sisestage ühekordselt kasutatav vatitampoon suhu vähemalt 30 sekundiks, kuni vatiots on süljega korralikult märgunud.
- **NB! Märkus:** valenegatiivsed tulemused võivad olla põhjustatud ebapiisavast süljeproovi kogumisest. Vatitampoon peab süljega korralikult läbi märguma.


## Ninasõrmest võetav proov:

1

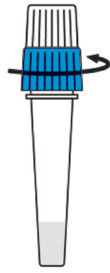


Keera lahti katsuti sinine kork katsutit pigistamata. Hoida katsuti püstises asendis, et puhverlahus välja ei valguks. Võta vatitampoon pakendist välja.

2

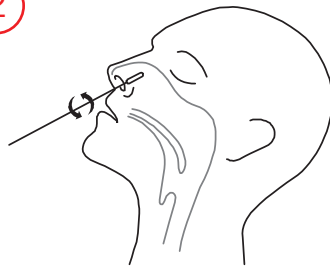


Sisesta vatitampoon ettevaatlikult ninasõrmesse kuni 2,5 cm sügavusele. Testproovi kogumiseks keeruta vatitampooni umbes 5 korda vastu ninasõrme limaskesta. Korda sama teises ninasõrmes. Eemalda tampoon ninaõõnsusest.

3

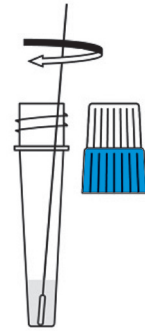


Sisesta vatitampoon katsutisse. Vatitampooni tuleb puhverlahuses vähemalt 30 sekundit hoida ja segada.

4

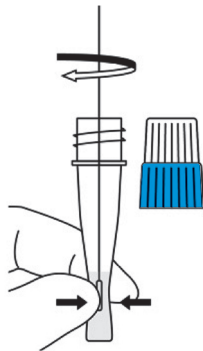

Et vedelik vatitampoonilt välja pigistada, suru katsuti küljed õrnalt kokku.

5

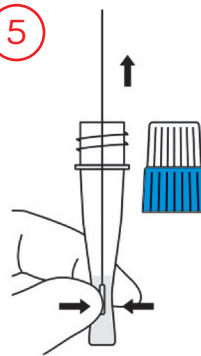


Võta vatitampoon katsutist välja.

6




Sulge katsuti sinine kork. Puhverlahuse segunemiseks loksuta katsutit õrnalt.

7

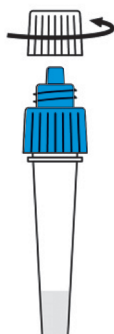

Ava katsuti läbipaistev kork, pööra katsuti ümber, hoida püstises asendis, tilguti suunaga allapoole.

8

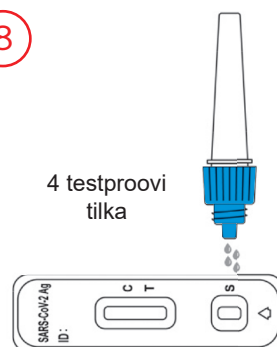

4 testproovi tilka  
Suru katsuti küljed õrnalt kokku ning tilguta 4 tilka lahust testkasseti süvendisse.

9




15-30 min  
Oota kuni ilmu(b)vad värvili(ne)sed joon(ed). Testi tulemusi loe 15-30 minuti jooksul. Testi tulemused on kehtetud pärast 30 minuti möödumist.


## TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE:



**NEGATIIVNE:** kontrollalale (C) ilmub üks värviline joon. Testjoone alas (T) ei ole nähtavat värvilist joont. SARS-CoV-2 antigeeni ei tuvastatud. Jätka toimetusi!

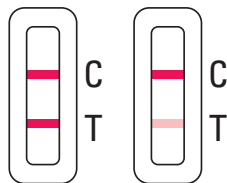

**POSITIIVNE:** nähtavad on kaks värvilist joont. Üks joon kontrollalal (C) ja teine joon testjoone alas (T). See tähendab, et tuvastati SARS-CoV-2 antigeen. Testjoone (T) värvi tugevus võib olla erinev. Positiivseks tuleb lugeda mis tahes värvivarjund testjoone alas (T).

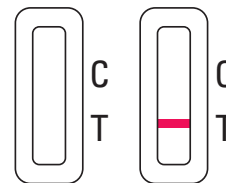

**KEHTETU:** kontrolljoont ei ilmu. Kontrolljoone mitteilmumise kõige tõenäolisemad põhjused on proovi ebapiisav kogus või vale tegutsemine. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja korrake testi uue komplektiga.

### KUI TESTI TULEMUS ON POSITIIVNE?

Toimi vastavalt Terviseameti soovitudele. Vajalike juhiste saamiseks:

- pöördu perearsti poole;
- helista perearsti nõuandetelefonile **1220**;
- pöördu Terviseameti poole - koroonaviirusega seotud küsimused **1247**.

### KUI TESTI TULEMUS ON NEGATIIVNE?

Kui testi tulemus on negatiivne ning haigussümptomeid ei ole, võib inimene igapäevatoimetusi jätkata, jälgides hoolikalt oma tervislikku seisundit.

Soovituslik on korrata antigeeni kiirtesti uuesti juhul:

- kui tekib kahtlus nakatumise suhtes (kokkupuude COVID-19 positiivse isikuga või haigestunuga);
  - kui tekivad haigussümptomid;
- Pöörduge sellisel juhul perearsti poole või helistage perearsti nõuandeliinile **1220**.